

SAEHAN Hydraulischer Fingerkraftmesser (SH5005)

Bedienungsanleitung



CE

Grip **SAEHAN**[®]
www.saehanmedical.com

SAEHAN Hydraulischer Fingerkraftmesser (SH5005)

Der hydraulische **SAEHAN** Fingerkraftmesser ermittelt genaue Druckkraftmesswerte der Finger im Spitz-, Schlüssel- und Palmargriff. Der Pinch Gauge kann als Diagnoseinstrument oder zur Überwachung des Rehabilitationsfortschritts verwendet werden.

Die Greifkraft wird auf einer Doppelskala in Pfund und Kilogramm gemessen (45 lbs oder 20 kg. Maximalwert). Das Gerät wird vom Therapeuten gehalten, nicht vom Patienten. Der Patient sollte den Druck auf den Pinch-Block mit den Fingerballen oder Fingerspitzen ausüben. Durch Drücken des Druckknopfes mit dem Daumen wird der Kraftwert auf dem Messgerät angezeigt.

Die Position der oberen Extremitäten kann die Messung der Greifkraft erheblich beeinflussen. Die American Society of Hand Therapists empfiehlt die folgende Testposition:

- (1) Der Patient sollte sitzen.
- (2) Die Schultern sollten adduziert und neutral gedreht sein.
- (3) Der Ellenbogen sollte bei 90 Grad gebeugt sein.
- (4) Unterarm und Handgelenk sollten sich in einer neutralen Position befinden.
- (5) Die Gradtoleranz beträgt $\pm 2\%$.
- (6) Wenn Sie dieses Gerät entsorgen, kann Öl austreten.

Griffarten

- (1) Spitzgriff – Gegenüberstellung der Fingerspitzen von Daumen und Zeigefinger
- (2) Schlüsselgriff – Gegenüberstellung der Fingerfläche (Fingerbeere) des Daumens und der Seitenfläche des mittleren Zeigefingerglieds
- (3) Palmargriff – Gegenüberstellung der Fingerfläche (Fingerbeere) des Daumens und der Fingerflächen (Fingerbeeren) von Zeige- und Mittelfinger

Eingeschränkte Zwei-Jahres-Garantie

SAEHAN garantiert, dass dieses hydraulische Messgerät für zwei Jahre ab Kaufdatum frei von Verarbeitungs- und Materialfehlern ist. Sollte dieses Gerät während der zweijährigen Garantiezeit defekt sein, wird **SAEHAN** es nach eigenem Ermessen reparieren oder ersetzen. Danach, wenn ein Defekt auftritt, wird eine Servicegebühr für die Reparatur erhoben. Diese Garantie gibt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte. Sie können auch andere Rechte haben, die von Staat zu Staat variieren.

TRANSPORT- UND LAGERBEDINGUNGEN:

Umwelt

1. Allgemein:

- Es ist nicht für die Verwendung in privaten Haushalten bestimmt.
- Es wird in Physiotherapieräumen, Arztpraxen und Patientenzimmern, etc. verwendet.
- Das Gerät kann beschädigt werden, wenn es auf den Boden fällt. Es kann nicht mehr gewährleistet werden, dass das Gerät ordnungsgemäß funktioniert. Wenn es ordnungsgemäß funktioniert, sollten die Kalibrierungsintervalle beibehalten werden.

2. Bedingungen der Lichtverhältnisse und Ablesen der Skala:

- Bereich der Umgebungsleuchtdichte: 100 Lux - 1.500 Lux
- Betrachtungsabstand: 20 cm - 40 cm
- Betrachtungswinkel: normal zum Display +/- 20°

3. Lagerung:

- Temperaturbereich: 10°C - 40°C
- Bereich der relativen Luftfeuchtigkeit: 10 % - 90 %
- Bereich des Umgebungsdrucks: 700 hPa-1.060 hPa

Symbole	Bedeutung
	Hersteller
	Herstellungsdatum
	Autorisierter Vertreter in der Europäischen Union
	Medizinprodukt
	Seriennummer
	LOT-Nummer
	Artikelnummer
	Achtung
	Zerbrechlich
	Vor Feuchtigkeit schützen
	Vor Sonneneinstrahlung schützen
	Gebrauchsanweisung beachten

WARNUNG:

Die größte Beschädigung tritt auf, wenn das Gerät auf den Boden fällt. Tragen Sie bei der Verwendung das Armband am Handgelenk.

SAEHAN Hydraulischer Fingerkraftmesser (SH5005)

Normbereichswerte für Griffstärke

Spitzgriff

Frauen - Einheit: lb

Alter	Rechte Hand		Bereich	Linke Hand		Bereich
	Mittel	SD		Mittel	SD	
6-7	6.7	1.2	4-10	6.1	1.5	3-10
8-9	7.6	1.4	5-10	7.2	1.3	5-10
10-11	9.7	1.4	7-13	9.4	1.7	6-12
12-13	10.6	2.2	6-17	10.1	2.3	5-17
14-15	10.2	2.3	5-15	9.5	2.4	4-17
16-17	11.9	2.3	9-19	11.1	2.3	7-17
18-19	13.5	2.8	7-20	13.4	2.9	8-20
20-24	11.1	2.1	8-16	10.5	1.7	8-14
25-29	11.9	1.8	8-16	11.3	1.8	9-18
30-34	12.6	3.0	8-20	11.7	2.8	7-17
35-39	11.6	2.5	8-19	11.9	2.4	8-16
40-44	11.5	2.7	5-15	11.1	3.0	6-17
45-49	13.2	3.0	9-19	12.1	2.7	7-18
50-54	12.5	2.2	9-18	11.4	2.4	7-16
55-59	11.7	1.7	9-16	10.4	1.4	8-13
60-64	10.1	2.1	7-17	9.9	2.0	6-15
65-69	10.6	2.0	7-15	10.5	2.4	7-17
70-74	10.1	2.6	7-15	9.8	2.3	6-17
75+	9.6	2.8	4-16	9.3	2.4	4-13

Quelle: Mathiowetz, Artikel "Grip Strength : Norms for 6 to 75+ year olds". American Journal of Occupational Therapy, Oct 1986 Vol, 40 NO.10

SAEHAN Hydraulischer Fingerkraftmesser (SH5005)

Normbereichswerte für Griffstärke

Spitzgriff

Männer - Einheit: lb

Alter	Rechte Hand		Bereich	Linke Hand		Bereich
	Mittel	SD		Mittel	SD	
6-7	7.2	1.6	4-10	7.1	1.4	5-11
8-9	8.6	2.2	6-17	8.3	2.2	4-15
10-11	10.0	2.4	5-16	9.5	2.3	5-16
12-13	10.5	2.5	5-14	9.8	2.3	5-13
14-15	13.1	2.9	8-20	12.6	3.0	6-18
16-17	15.0	2.7	11-21	13.8	2.7	7-22
18-19	17.0	3.8	10-31	16.1	3.8	11-29
20-24	18.0	3.0	11-23	17.0	2.3	12-33
25-29	18.3	4.4	10-34	17.5	5.2	12-36
30-34	17.6	6.7	12-25	17.6	4.8	10-27
35-39	18.0	3.6	12-27	17.7	3.8	10-24
40-44	17.8	4.0	11-25	17.7	3.5	12-25
45-49	18.7	4.9	12-30	17.6	4.1	12-28
50-54	18.3	4.0	11-24	17.8	3.9	12-26
55-59	16.6	3.3	11-24	15.0	3.7	10-26
60-64	15.8	3.9	9-22	15.3	3.7	9-23
65-69	17.0	4.2	11-27	15.4	2.9	10-21
70-74	13.8	2.6	11-21	13.3	2.6	10-21
75+	14.0	3.4	7-21	13.9	3.7	8-25

Quelle: Mathiowetz, Artikel "Grip Strength : Norms for 6 to 75+ year olds". American Journal of Occupational Therapy, Oct 1986 Vol, 40 NO.10

SAEHAN Hydraulischer Fingerkraftmesser (SH5005)

Normbereichswerte für Griffstärke

Schlüsselgriff

Frauen - Einheit: lb

Alter	Rechte Hand		Bereich	Linke Hand		Bereich
	Mittel	SD		Mittel	SD	
6-7	9.6	1.5	6-12	9.1	1.5	5-11
8-9	11.6	2.6	8-23	11.3	2.1	8-20
10-11	14.2	2.1	11-21	13.3	2.0	11-19
12-13	15.2	2.6	11-22	14.1	3.0	10-23
14-15	15.6	2.5	12-22	14.8	2.7	7-22
16-17	17.3	3.0	12-27	16.6	3.1	11-25
18-19	18.1	2.4	12-23	17.2	2.5	12-22
20-24	17.6	2.0	14-23	16.2	2.1	13-23
25-29	17.7	2.1	14-22	16.6	2.1	13-22
30-34	18.7	3.0	13-25	17.8	3.6	12-26
35-39	16.6	2.0	12-21	16.0	2.7	12-22
40-44	16.7	3.1	10-24	15.8	3.1	8-22
45-49	17.6	3.2	13-24	16.6	2.9	12-24
50-54	16.7	2.5	12-22	16.1	2.7	12-22
55-59	15.7	2.5	11-21	14.7	2.2	12-19
60-64	15.5	2.7	10-20	14.1	2.5	10-19
65-69	15.0	2.6	10-21	14.3	2.8	10-20
70-74	14.5	2.9	8-22	13.8	3.0	9-22
75+	12.6	2.3	8-17	11.4	2.6	7-16

Quelle: Mathiowetz, Artikel "Grip Strength : Norms for 6 to 75+ year olds". American Journal of Occupational Therapy, Oct 1986 Vol, 40 NO.10

SAEHAN Hydraulischer Fingerkraftmesser (SH5005)

Normbereichswerte für Griffstärke

Schlüsselgriff

Männer - Einheit: lb

Alter	Rechte Hand		Bereich	Linke Hand		Bereich
	Mittel	SD		Mittel	SD	
6-7	11.3	2.0	7-16	10.6	2.1	4-15
8-9	13.1	2.6	9-18	12.2	2.5	8-20
10-11	15.3	3.1	9-22	14.5	2.9	9-22
12-13	16.6	2.9	11-22	15.6	2.8	10-21
14-15	20.9	3.8	14-32	19.9	3.7	12-26
16-17	23.3	3.4	14-31	21.8	3.6	13-30
18-19	23.5	4.1	17-34	22.9	4.0	14-33
20-24	26.0	3.5	21-34	24.8	3.4	19-31
25-29	26.7	4.9	19-41	25.0	4.4	19-39
30-34	26.4	4.8	20-36	26.2	5.1	17-36
35-39	26.1	3.2	21-32	25.6	3.9	18-32
40-44	25.6	2.6	21-31	25.1	4.0	19-31
45-49	25.8	3.9	19-35	24.8	4.4	18-42
50-54	26.7	4.4	20-34	26.1	4.2	20-37
55-59	24.2	4.2	18-34	23.0	4.7	13-31
60-64	23.2	5.4	14-37	22.2	4.1	16-33
65-69	23.4	3.9	17-32	22.0	3.6	17-28
70-74	19.3	2.4	16-25	19.2	3.0	13-28
75+	20.5	4.6	9-31	19.1	3.0	13-24

Quelle: Mathiowetz, Artikel "Grip Strength : Norms for 6 to 75+ year olds". American Journal of Occupational Therapy, Oct 1986 Vol, 40 NO.10

SAEHAN Hydraulischer Fingerkraftmesser (SH5005)

Normbereichswerte für Griffstärke

Palmargriff

Frauen - Einheit: lb

Alter	Rechte Hand		Bereich	Linke Hand		Bereich
	Mittel	SD		Mittel	SD	
6-7	9.0	1.7	6-12	8.4	1.4	6-11
8-9	10.7	2.1	8-17	10.3	2.2	6-20
10-11	13.5	2.2	11-22	12.6	2.0	10-17
12-13	15.4	2.6	11-23	14.2	2.8	10-20
14-15	15.6	3.3	9-26	14.7	3.4	8-25
16-17	17.8	3.9	12-27	16.6	3.9	10-26
18-19	20.2	3.3	10-26	19.0	3.0	14-25
20-24	17.2	2.3	14-23	16.3	2.8	11-24
25-29	17.7	3.2	13-29	17.0	3.0	13-26
30-34	19.3	5.0	12-34	18.1	4.8	12-32
35-39	17.5	4.2	13-29	17.1	3.4	12-24
40-44	17.0	3.1	10-23	16.6	3.5	10-25
45-49	17.9	3.0	12-27	17.5	2.8	12-24
50-54	17.3	3.1	12-23	16.4	2.9	12-22
55-59	16.0	3.1	11-26	15.4	3.0	11-21
60-64	14.8	3.1	10-20	14.3	2.7	10-20
65-69	14.2	3.1	8-20	13.7	3.4	8-22
70-74	14.4	2.6	9-19	14.0	1.9	10-17
75+	12.0	2.6	8-17	11.5	2.6	6-16

Quelle: Mathiowetz, Artikel "Grip Strength : Norms for 6 to 75+ year olds". American Journal of Occupational Therapy, Oct 1986 Vol, 40 NO.10

SAEHAN Hydraulischer Fingerkraftmesser (SH5005)

Normbereichswerte für Griffstärke

Palmargriff

Männer - Einheit: lb

Alter	Rechte Hand		Bereich	Linke Hand		Bereich
	Mittel	SD		Mittel	SD	
6-7	10.0	2.2	5-13	9.2	2.0	5-13
8-9	11.6	2.3	7-17	11.2	2.8	6-16
10-11	13.9	2.7	7-21	13.2	2.9	8-23
12-13	15.5	3.6	8-26	15.1	4.1	8-23
14-15	19.2	4.2	11-28	18.8	5.0	10-33
16-17	22.2	5.0	17-39	20.3	4.1	14-31
18-19	23.8	4.3	17-34	23.4	4.5	16-34
20-24	26.6	5.5	18-45	25.7	5.8	15-42
25-29	26.0	4.3	19-35	25.1	4.2	19-36
30-34	24.7	4.7	16-34	25.4	5.7	15-37
35-39	26.2	4.1	19-36	25.9	5.4	14-40
40-44	24.5	4.3	17-37	24.8	4.9	15-37
45-49	24.0	3.3	19-33	23.7	3.8	18-33
50-54	23.8	5.4	15-36	24.0	5.8	16-36
55-59	23.7	4.8	16-34	21.3	4.5	12-28
60-64	21.8	3.3	16-28	21.2	3.2	15-27
65-69	21.4	3.0	15-25	21.2	4.1	14-30
70-74	18.1	3.4	14-27	18.8	3.3	13-27
75+	18.7	4.2	9-26	18.3	3.8	10-26

Quelle: Mathiowetz, Artikel "Grip Strength : Norms for 6 to 75+ year olds". American Journal of Occupational Therapy, Oct 1986 Vol, 40 NO.10

SAEHAN Hydraulischer Fingerkraftmesser (SH5005)

Normbereichswerte für Griffstärke

Spitzgriff

Frauen - Einheit: kg

Alter	Rechte Hand		Bereich	Linke Hand		Bereich
	Mittel	SD		Mittel	SD	
6-7	3.0	0.5	1-5	2.8	0.7	1-5
8-9	3.4	0.6	2-5	3.3	0.6	2-5
10-11	4.4	0.6	3-6	4.3	0.8	2-5
12-13	4.8	1.0	2-8	4.6	1.0	2-8
14-15	4.6	1.0	2-7	4.3	1.1	1-8
16-17	5.4	1.0	4-9	5.0	1.0	3-8
18-19	6.1	1.3	3-9	6.1	1.3	3-9
20-24	5.0	1.0	3-7	4.8	0.8	3-6
25-29	5.4	0.8	3-7	5.1	0.8	4-8
30-34	5.7	1.4	3-9	5.3	1.3	3-8
35-39	5.3	1.1	3-9	5.4	1.1	3-7
40-44	5.2	1.2	2-7	5.0	1.4	2-8
45-49	6.0	1.4	4-9	5.5	1.2	3-8
50-54	5.7	1.0	4-8	5.2	1.1	3-7
55-59	5.3	0.8	4-7	4.7	0.6	3-6
60-64	4.6	1.0	3-8	4.5	0.9	2-7
65-69	4.8	0.9	3-7	4.8	1.1	3-8
70-74	4.6	1.2	3-7	4.4	1.0	2-8
75+	4.4	1.3	1-7	4.2	1.1	1-6

Quelle: Mathiowetz, Artikel "Grip Strength : Norms for 6 to 75+ year olds". American Journal of Occupational Therapy, Oct 1986 Vol, 40 NO.10

SAEHAN Hydraulischer Fingerkraftmesser (SH5005)

Normbereichswerte für Griffstärke

Spitzgriff

Männer - Einheit: kg

Alter	Rechte Hand		Bereich	Linke Hand		Bereich
	Mittel	SD		Mittel	SD	
6-7	3.3	0.7	1-5	3.2	0.6	2-5
8-9	3.9	1.0	2-8	3.8	1.0	1-7
10-11	4.5	1.1	2-7	4.3	1.0	2-7
12-13	4.8	1.1	2-6	4.4	1.0	2-6
14-15	5.9	1.3	3-9	5.7	1.4	2-8
16-17	6.8	1.2	4-10	6.3	1.2	3-10
18-19	7.7	1.7	4-14	7.3	1.7	4-13
20-24	8.2	1.4	4-10	7.7	1.0	5-15
25-29	8.3	2.0	4-15	7.9	2.4	5-16
30-34	8.0	3.0	5-11	8.0	2.2	4-12
35-39	8.2	1.6	5-12	8.0	1.7	4-11
40-44	8.1	1.8	4-11	8.0	1.6	5-11
45-49	8.5	2.2	5-14	8.0	1.9	5-13
50-54	8.3	1.8	4-11	8.1	1.8	5-12
55-59	7.5	1.5	4-11	6.8	1.7	4-12
60-64	7.2	1.8	4-10	6.9	1.7	4-10
65-69	7.7	1.9	4-12	7.0	1.3	4-10
70-74	6.3	1.2	4-10	6.0	1.2	4-10
75+	6.4	1.5	3-10	6.3	1.7	3-11

Quelle: Mathiowetz, Artikel "Grip Strength : Norms for 6 to 75+ year olds". American Journal of Occupational Therapy, Oct 1986 Vol, 40 NO.10

SAEHAN Hydraulischer Fingerkraftmesser (SH5005)

Normbereichswerte für Griffstärke

Schlüsselgriff

Frauen - Einheit: kg

Alter	Rechte Hand		Bereich	Linke Hand		Bereich
	Mittel	SD		Mittel	SD	
6-7	4.4	0.7	2-5	4.1	0.7	2-5
8-9	5.3	1.2	3-10	5.1	1.0	3-9
10-11	6.4	1.0	4-10	6.0	0.9	4-9
12-13	6.9	1.2	4-10	6.4	1.4	4-10
14-15	7.1	1.1	5-10	6.7	1.2	3-10
16-17	7.8	1.4	5-12	7.5	1.4	4-11
18-19	8.2	1.1	5-10	7.8	1.1	5-10
20-24	8.0	0.9	6-10	7.3	1.0	5-10
25-29	8.0	1.0	6-10	7.5	1.0	5-10
30-34	8.5	1.4	5-11	8.1	1.6	5-12
35-39	7.5	0.9	5-10	7.3	1.2	5-10
40-44	7.6	1.4	4-11	7.2	1.4	3-10
45-49	8.0	1.5	5-11	7.5	1.3	5-11
50-54	7.6	1.1	5-10	7.3	1.2	5-10
55-59	7.1	1.1	4-10	6.7	1.0	5-9
60-64	7.0	1.2	4-9	6.4	1.1	4-9
65-69	6.8	1.2	4-10	6.5	1.3	4-9
70-74	6.6	1.3	3-10	6.3	1.4	4-10
75+	5.7	1.0	3-8	5.2	1.2	3-7

Quelle: Mathiowetz, Artikel "Grip Strength : Norms for 6 to 75+ year olds". American Journal of Occupational Therapy, Oct 1986 Vol, 40 NO.10

SAEHAN Hydraulischer Fingerkraftmesser (SH5005)

Normbereichswerte für Griffstärke

Schlüsselgriff

Männer - Einheit: kg

Alter	Rechte Hand		Bereich	Linke Hand		Bereich
	Mittel	SD		Mittel	SD	
6-7	5.1	0.9	3-7	4.8	1.0	1-7
8-9	5.9	1.2	4-8	5.5	1.1	3-9
10-11	6.9	1.4	4-10	6.6	1.3	4-10
12-13	7.5	1.3	4-10	7.1	1.3	4-10
14-15	9.5	1.7	6-15	9.0	1.7	5-12
16-17	10.6	1.5	6-14	9.9	1.6	5-14
18-19	10.7	1.9	7-15	10.4	1.8	6-15
20-24	11.8	1.6	9-15	11.2	1.5	8-14
25-29	12.1	2.2	8-19	11.3	2.0	8-18
30-34	12.0	2.2	9-16	11.9	2.3	7-16
35-39	11.8	1.5	9-15	11.6	1.8	8-15
40-44	11.6	1.2	9-14	11.4	1.8	8-14
45-49	11.7	1.8	8-16	11.2	2.0	8-19
50-54	12.1	2.0	9-15	11.8	1.9	9-17
55-59	11.0	1.9	8-15	10.4	2.1	5-14
60-64	10.5	2.4	6-17	10.1	1.9	7-15
65-69	10.6	1.8	7-15	10.0	1.6	7-13
70-74	8.8	1.1	7-11	8.7	1.4	5-13
75+	9.3	2.1	4-14	8.7	1.4	5-11

Quelle: Mathiowetz, Artikel "Grip Strength : Norms for 6 to 75+ year olds". American Journal of Occupational Therapy, Oct 1986 Vol, 40 NO.10

SAEHAN Hydraulischer Fingerkraftmesser (SH5005)

Normbereichswerte für Griffstärke

Palmargriff

Frauen - Einheit: kg

Alter	Rechte Hand		Bereich	Linke Hand		Bereich
	Mittel	SD		Mittel	SD	
6-7	4.1	0.8	2-5	3.8	0.6	2-5
8-9	4.9	1.0	3-8	4.7	1.0	2-9
10-11	6.1	1.0	4-10	5.7	0.9	4-8
12-13	7.0	1.2	4-10	6.4	1.3	4-9
14-15	7.1	1.5	4-12	6.7	1.5	3-11
16-17	8.1	1.8	5-12	7.5	1.8	4-12
18-19	9.2	1.5	4-12	8.6	1.4	6-11
20-24	7.8	1.0	6-10	7.4	1.3	4-11
25-29	8.0	1.5	5-13	7.7	1.4	5-12
30-34	8.8	2.3	5-15	8.2	2.2	5-15
35-39	7.9	1.9	5-13	7.8	1.5	5-11
40-44	7.7	1.4	4-10	7.5	1.6	4-11
45-49	8.1	1.4	5-12	7.9	1.3	5-11
50-54	7.8	1.4	5-10	7.4	1.3	5-10
55-59	7.3	1.4	4-12	7.0	1.4	4-10
60-64	6.7	1.4	4-9	6.5	1.2	4-9
65-69	6.4	1.4	3-9	6.2	1.5	3-10
70-74	6.5	1.2	4-9	6.4	0.9	4-8
75+	5.4	1.2	3-8	5.2	1.2	2-7

Quelle: Mathiowetz, Artikel "Grip Strength : Norms for 6 to 75+ year olds". American Journal of Occupational Therapy, Oct 1986 Vol, 40 NO.10

SAEHAN Hydraulischer Fingerkraftmesser (SH5005)

Normbereichswerte für Griffstärke

Palmargriff

Männer - Einheit: kg

Alter	Rechte Hand		Bereich	Linke Hand		Bereich
	Mittel	SD		Mittel	SD	
6-7	4.5	1.0	2-6	4.2	0.9	2-6
8-9	5.3	1.0	3-8	5.1	1.3	2-7
10-11	6.3	1.2	3-10	6.0	1.3	3-10
12-13	7.0	1.6	3-12	6.8	1.9	3-10
14-15	8.7	1.9	4-13	8.5	2.3	4-15
16-17	10.1	2.3	7-18	9.2	1.9	6-14
18-19	10.8	2.0	7-15	10.6	2.0	7-15
20-24	12.1	2.5	8-20	11.7	2.6	6-19
25-29	11.8	2.0	8-16	11.4	1.9	8-16
30-34	11.2	2.1	7-15	11.5	2.6	6-17
35-39	11.9	1.9	8-16	11.7	2.4	6-18
40-44	11.1	2.0	7-17	11.2	2.2	6-17
45-49	10.9	1.5	8-15	10.8	1.7	8-15
50-54	10.8	2.4	6-16	10.9	2.6	7-16
55-59	10.8	2.2	7-15	9.7	2.0	5-13
60-64	9.9	1.5	7-13	9.6	1.5	6-12
65-69	9.7	1.4	6-11	9.6	1.9	6-14
70-74	8.2	1.5	6-12	8.5	1.5	5-12
75+	8.5	1.9	4-12	8.3	1.7	4-12

Quelle: Mathiowetz, Artikel "Grip Strength : Norms for 6 to 75+ year olds". American Journal of Occupational Therapy, Oct 1986 Vol, 40 NO.10

SAEHAN

Hydraulischer Fingerkraftmesser

(SH5005)

Hersteller

SAEHAN Corporation

23-29, Bongamgongdan 13-gil,
Masanhoewon-gu, Changwon-si,
Gyeongsangnam-do, 51342, S.Korea
Phone: +82-55-294-0381
Website: www.saeahanmedical.com
E-mail: saeahancorp@naver.com

EC Representative

MVS In Motion

Westdijk 150
2830 Tisselt Belgium - Europe
Phone: +32-3-866-40-76
Website: mvs-in-motion.com
E-mail: info@mvs-in-motion.com



AFH Webshop® · Inhaber Rainer Zumhasch · Pyrmonter Straße 50 · 32676 Lügde · Germany
Tel.: 0049 5281/98712-63 · info@premium-therapie.de · www.premium-therapie.de

✂ Sollte sich im Zusammenhang mit dem auf den Markt gebrachten Produkt ein schwerer Unfall ereignet haben, wird der Qualitätsmanagementbeauftragte unseres Unternehmens die benannte Stelle und die zuständige Behörde über jeden schweren Unfall in Übereinstimmung mit dem Vigilanzverfahren informieren.