

SAEHAN Squeeze Dynamometer

Gebrauchsanweisung



CE

Grip SAEHAN®

SAEHAN SQUEEZE DYNAMOMETER

(SH5008)

Es handelt sich um ein neues und verbessertes Design, das eine kostengünstige und genaue Möglichkeit zur Messung der Hand- und Fingerkraft bietet.

Der Ball besteht aus klinischem Standard-Silikon anstelle von Gummi, um ein angenehmes Gefühl, sichere Tests und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Das hochpräzise SAEHAN-Messgerät, das in Pfund und Kilogramm kalibriert ist, zeigt die tatsächlich eingesetzte Kraft an. Die Messabstufung erfolgt in Schritten von 1 kg (2.2 lbs) auf den unteren Stufen und in Schritten von 2 kg (4.4 lbs) auf den oberen Stufen, um genauere Testergebnisse zu gewährleisten.

Das Dynamometer ist einfach zu bedienen. Drücken Sie auf den Ball und lesen Sie die maximal erzeugte Kraft ab. Der maximale Messwert bleibt erhalten, bis das Gerät zurückgesetzt wird. Stellen Sie die Anzeigenadel auf 0 zurück und testen Sie erneut.

Achtung!

Die schlimmsten Schäden treten auf, wenn das Gerät auf den Boden fällt. Tragen Sie bei der Benutzung den Gurt am Handgelenk

TRANSPORT- UND LAGERBEDINGUNGEN:

Umwelt

1. Allgemein

- Es ist nicht für die Verwendung in Haushalten gedacht.
- Es wird in Physiotherapieräumen, Arztpraxen und Patientenzimmern etc. verwendet.
- Das Gerät kann beschädigt werden, wenn es auf den Boden fällt.
- Es kann nicht mehr erwartet werden, dass es ordnungsgemäß funktioniert. Wenn es ordnungsgemäß funktioniert, sollte die Kalibrierung/Genauigkeit beibehalten werden.

2. Bedingungen der Sichtbarkeit

- Bereich der Umgebungsleuchtdichte: 100 Lux ~ 1.500 Lux
- Betrachtungsabstand: 20 ~ 40 cm
- Betrachtungswinkel: normal zum Display +/- 20°

3. Physikalisch

- Temperaturbereich: 10°C ~ 40°C
- Bereich der relativen Luftfeuchtigkeit: 10 % ~ 90 %
- Umgebungsdruckbereich: 700 hPa ~ 1.060 hPa

SYMBOLS

<i>Symbole</i>	<i>Bedeutung</i>
	Hersteller
	Herstellerdatum
	Autorisierte EU Repräsentative
	Medizinprodukt
	Seriennummer
	Charge
	Herstellernummer
	Achtung
	Zerbrechlich, mit Sorgfalt behandeln
	Trocken halten
	Von Sonnenlicht fernhalten
	Gebrauchsanweisung beachten

Sollte sich ein schwerer Unfall im Zusammenhang mit unserem gekennzeichneten Produkt ereignet haben, wird der Qualitätsmanagementbeauftragte der Firma SAEHAN die benannte Stelle und die zuständige Behörde gemäß dem Vigilanzverfahren über jeden schweren Unfall informieren.



SAEHAN Squeeze Dynamometer

Händler



Inhaber Rainer Zumhasch
Pyrmonter Straße 50 · 32676 Lügde · Germany

Te.l: 0049 5281/98712-63

Fax: 0049 5281/98712-64

info@premium-therapie.de
www.premium-therapie.de



Hersteller

SAEHAN Corporation

23-29, Bongamgongdan 13-gil,
Masanhoewon-gu, Changwon-si,
Gyeongsangnam-do, 51342, S.Korea
Phone: +82-55-294-0381
Website: www.saehanmedical.com
E-mail: saehancorp@naver.com

EC Representative

Mvs In Motion

Westdijk 150
2830 Tiselt Belgium - Europe
Phone: +32-3-866-40-76
Website: mvs-in-motion.com
E-mail: info@mvs-in-motion.com