

Bedienungsanleitung

AFH TheraPIE Platte

Liebe Kundin, lieber Kunde, vielen Dank, dass Sie sich für unsere AFH-Produkte entschieden haben. AFH Produkte stehen für qualitativ hochwertige Materialien und Verarbeitung. Ihre Anforderungen sind unser Maßstab.



Anwendungsgebiete

Unsere TheraPIE Platte wurde entwickelt, um ein stabiles Training bei der Beugung und der Streckung der PIP- und DIP-Gelenke zu ermöglichen. Sie kann zu aktiven Bewegungsübungen der Gelenke ebenso eingesetzt werden wie zur Unterstützung der passiven Mobilisation.


Die TheraPIE Platte kann somit zur Durchführung von Blocking Exercises im Hinblick auf isolierte und korrelierte Bewegungen der Fingergelenke genutzt werden. Ein gezieltes Üben unter Ausschluss von Ausweichbewegungen wird so gewährleistet, wodurch sie sich auch sehr gut für das Eigen-training eignet.



Verpackungsinhalt:

- 1x TheraPIE Platte (Plexiglasplatte) 13 cm x 11 cm
- 1x Fingerauflage selbstklebende Polsterunterlage
- 1x Klettverschluss Band




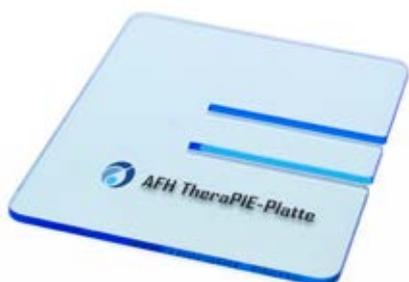

1.

1.) Nehmen Sie alle Teile aus der Verpackung und legen Sie die Plexiglasplatte auf einen geraden Untergrund.

2.

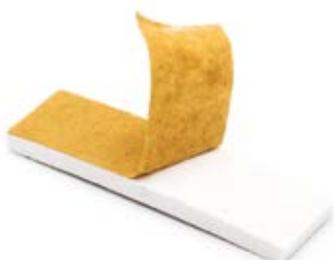

2.) Nehmen Sie die Schaumstoff Polsterung (Fingerauflage) und ziehen Sie die Trägerfolie des Klebestreifens ab.

3.



3.) Kleben Sie die Schaumstoffpolsterung an die dafür vorhergesehene Position.

4.



4.) Nehmen Sie das Klettverschlussband und formen eine Schlaufe, sodass Ihr Finger und die Polsterauflage in die Schlaufe passt.

5.



5.) Ziehen Sie Ihre geformte Schlaufe des Klettverschlussbandes durch die beiden Schlitze auf der Plexiglasplatte.



Ihre AFH TheraPIE Platte ist jetzt Einsatzbereit!

