

## Gebrauchsanweisung – EDEMA-Handschuhe

Catell empfiehlt, dass das Produkt nur durch medizinisches Fachpersonal angepasst wird. Anwender mit Diabetes, empfindlicher Haut, bekannten Kontaktallergien, eingeschränkter Sensibilität oder schlechter Durchblutung müssen besonders aufmerksam sein und bei der Verwendung der Catell EDEMA Handschuhe auf Druckstellen, Scheuerstellen oder Ödeme achten.

Die Behandlung mit Kompression kann unter bestimmten Bedingungen kontraindiziert sein, z. B. bei anhaltenden Infektionen/Entzündungen, Herzproblemen, Tumorerkrankungen, Nieren- und Lebererkrankungen und peripheren Neuropathien - im Zweifelsfall ist ein Arzt zu konsultieren. Prüfen Sie in jedem Fall den Inhalt des Materials unten.

Alle schwerwiegenden Vorfälle im Zusammenhang mit dem Produkt sollten dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, in dem der Anwender und/oder Patient ansässig ist, gemeldet werden. Wenden Sie sich an Ihren Arzt oder an Catell, wenn Sie Fragen zum Produkt haben.

### Verwendungsbereiche

Die Catell EDEMA Handschuhe werden verwendet, um Schwellungen der Hände zu reduzieren.

### Eigenschaften:

Nähte an der Außenseite, um den Druck auf empfindliche Stellen zu minimieren. Die Handschuhe können links und rechts getragen werden (bilateral).

### Material:

Nylon, Elasthan, Latexfrei



**Reinigungshinweise:** Beachten Sie die nachstehenden Waschinweise. Verwenden Sie einen Wäschesack. Horizontal trocknen lassen.



# Gebrauchsanweisung – EDEMA-Handschuhe

**Sicherheitshinweise:** Kontaktieren Sie Ihren Arzt, wenn die Schwellung zunimmt, das Tragen Taubheit verursacht und wenn Sie Schmerzen beim Tragen des Fingerschlauchs verspüren. Aus gesundheitserhaltenden und hygienischen Gründen empfehlen wir diesen Artikel nur von einer Person zu verwenden.

## Ausführung und Kompressionsklassen:

In den Farben Beige und Schwarz erhältlich.

Model	Kompressionsklasse
EDEMA Light $\frac{3}{4}$ Finger	1-2 (15-25mmHg)
EDEMA Light Fullfinger	1-2 (15-25mmHg)
EDEMA More $\frac{3}{4}$ Finger	2 (12-32mmHg)
EDEMA More Fullfinger	2 (12-32mmHg)



## Größen

Gemessen wird der Umfang des MCP-Gelenks

Größe	Umfang
XXS	ca. 13-15 cm
XS	ca. 15-18 cm
S	ca. 18-20 cm
M	ca. 20-22 cm
L	ca. 22-24 cm
XL	ca. 24-27 cm



Die Handschuhe können links und rechts getragen werden.

**Entsorgung:** Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften.

**Hinweise:** Das Produkt entspricht der Medical Device Regulation (MDR) – VERORDNUNG (EU) 2017/745, ist somit ein Medizinprodukt der Klasse 1 und für den medizinischen Gebrauch geeignet. Einzelner Patient - mehrfach anwendbar.