

TheraPIE Knete

Gebrauchsanweisung



DE Nicht für Kinder unter 3 Jahren | Nicht zum Verzehr geeignet

EN Not for children under 3 years | Not for consumption



FR Pas pour les enfants de moins de 3 ans | Non destiné à la consommation

IT Non per bambini sotto i 3 anni | Non per il consumo

DE Gebrauchsanweisung beachten | Medizinprodukt | Einzelner Patient – mehrfach anwendbar

FR Respecter les instructions d'utilisation | dispositif médical | Patient unique - applications multiples

EN Observe the instructions for use | medical device | Single patient - multiple applications


IT Osservare le istruzioni per l'uso | dispositivo medico | Paziente singolo - applicazioni multiple

DE Gebrauchsanweisung beachten | Medizinprodukt | Einzelner Patient – mehrfach anwendbar

FR Respecter les instructions d'utilisation | dispositif médical | Patient unique - applications multiples

EN Observe the instructions for use | medical device | Single patient - multiple applications

IT Osservare le istruzioni per l'uso | dispositivo medico | Paziente singolo - applicazioni multiple

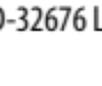

FG-Health Concepts GmbH
Baarerstrasse 101, CH-6300 Zug



AFH Webshop® Rainer Zumhasch, Pyrmonter Straße 50,
D-32676 Lügde, www.premium-therapie.de



AFH TheraPIE Knete

Istruzioni per l'uso

Uso previsto:

Questo dispositivo medico è una plastilina terapeutica senza lattice che viene utilizzata per migliorare il movimento e la funzione del circuito neuromuscolare attraverso esercizi speciali per le dita e la mano.

Indicazioni:

Ripristino della capacità di muovere la mano

Controindicazioni:

Malattie della pelle nella zona del palmo, ad es: (neurodermite, ferite aperte).

Rischi di utilizzo / Informazioni importanti

- Utilizzare TheraPIE Knete secondo le indicazioni.
- uso simultaneo con altri prodotti solo dopo aver consultato il medico o il terapeuta
- non apportare modifiche al prodotto
- non utilizzare su ferite aperte nella zona del palmo della mano
- non riutilizzare - questo aiuto è destinato alla cura di un paziente

- Attenzione: non adatto al consumo

- Non adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni

- Non sporcare i vestiti o altri tessuti o simili

- Se la plastilina è stata messa negli occhi, lavare l'occhio con acqua. Consultare un medico se necessario

- In caso di dolore, arrossamento, gonfiore o altri problemi, ridurre la frequenza degli esercizi o la resistenza o interrompere l'intero programma di esercizi.

Istruzioni per l'uso


Discutere l'uso e la durata con il medico prescrittore.

La selezione della forza appropriata e le istruzioni saranno date dal personale specializzato dal quale

avete ricevuto il dispositivo medico.



Flessione del polso

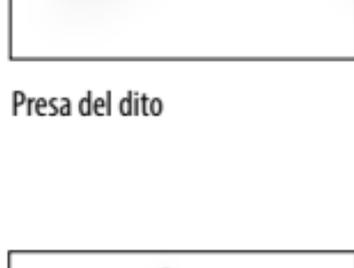

Presca del dito



Estensione delle dita



Rotolamento del palmo della mano

Conservazione

A causa del comportamento di scorrimento viscoso della plastilina terapeutica, così come contro la contaminazione, la plastilina terapeutica dovrebbe essere sempre conservata nel barattolo chiuso, a temperatura ambiente.

Composizione del materiale

Olio di silicone (82%), biossido di silicio (15%), acido bórico (<2%), pigmenti colorati (1%).

Istruzioni per la pulizia:

La plastilina terapeutica non può essere pulita.

Si prega di lavare e disinfettare accuratamente le mani prima dell'uso.

Garanzia

Al prodotto acquistato si applicano le norme legali del paese in cui avete acquistato il prodotto. Si prega di contattare il rivenditore se si sospetta una richiesta di garanzia. Si prega di pulire il prodotto prima di presentare un reclamo in garanzia. Se le istruzioni per l'uso allegate non sono state sufficientemente rispettate, la garanzia può essere compromessa o invalidata. La garanzia è esclusa in caso di utilizzo non conforme

all'indicazione, di inosservanza dei rischi di applicazione e delle istruzioni nonché di modifiche non autorizzate del prodotto.

Vita utile / durata di vita del prodotto

La durata di vita del TheraPIE Knete è determinata dall'usura naturale in condizioni di utilizzo corretto e di trattamento orientato all'applicazione. Al termine del trattamento, della terapia o dell'allenamento personalizzato smaltire correttamente l'argilla terapeutica.

Obbligo di segnalazione

Se durante l'uso del dispositivo medico si verifica un grave peggioramento della salute, segnalarlo al rivenditore specializzato o a noi in qualità di produttore e al BfArM (Istituto federale per i farmaci e i dispositivi medici). Se si risiede in Svizzera, si prega di contattare il nostro rappresentante autorizzato svizzero all'indirizzo rappresentante svizzero all'indirizzo: info@fg-health.ch o direttamente a Swissmedic in caso di reclami.

Smaltimento:

Al termine dell'utilizzo, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle norme locali.

Dichiarazione di conformità

Confermiamo che questo prodotto è conforme ai requisiti del REGOLAMENTO (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio.