

TheraPIE Knete

Gebrauchsanweisung



DE Nicht für Kinder unter 3 Jahren | Nicht zum Verzehr geeignet

EN Not for children under 3 years | Not for consumption



FR Pas pour les enfants de moins de 3 ans | Non destiné à la consommation

IT Non per bambini sotto i 3 anni | Non per il consumo

DE Gebrauchsanweisung beachten | Medizinprodukt | Einzelnr Patient – mehrfach anwendbar

FR Respecter les instructions d'utilisation | dispositif médical | Patient unique - applications multiples

EN Observe the instructions for use | medical device | Single patient - multiple applications

IT Osservare le istruzioni per l'uso | dispositivo medico | Paziente singolo - applicazioni multiple



FG-Health Concepts GmbH
Baarerstrasse 101, CH-6300 Zug



AFH Webshop® Rainer Zumhasch, Pyrmonter Straße 50,
D-32676 Lügde, www.premium-therapie.de



AFH TheraPIE Knete

Mode d'emploi

Utilisation prévue:

Ce dispositif médical est une plastiline thérapeutique sans latex qui est utilisée pour améliorer le mouvement et la fonction du circuit neuromusculaire par des exercices spéciaux des doigts et des mains.

Indications:

Restauration de la capacité à bouger la main

Contre-indications:

Maladies de la peau dans la région de la paume, par ex : (neurodermatite, plaies ouvertes).

Risques d'utilisation / Informations importantes

– Utilisez TheraPIE Knete conformément à l'indication.

– Utilisation simultanée avec d'autres produits uniquement après consultation de votre médecin ou thérapeute.

– ne pas modifier le produit

– ne pas utiliser sur des plaies ouvertes dans la région de la paume de la main

– ne pas réutiliser - cette aide est destinée aux soins d'un patient

– Attention : ne convient pas à la consommation

– Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans

– Ne pas mettre sur les vêtements ou autres textiles ou similaires

– Si la pâte à modeler a été mise en contact avec les yeux, les rincer à l'eau. Consulter un médecin si nécessaire

– En cas de douleur, de rougeur, de gonflement ou d'autres problèmes, réduisez la fréquence ou la résistance des exercices ou arrêtez tout le programme d'exercices.

Mode d'emploi


Discutez de l'utilisation et de la durée avec votre médecin prescripteur. Le choix de la résistance appropriée et les instructions seront donnés par le personnel spécialisé qui vous a remis le dispositif médical.




Flexion du poignet



Préhension du bout du doigt

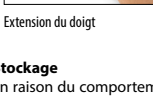

Extension du doigt

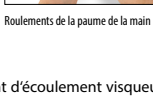

Roulements de la paume de la main

Stockage

En raison du comportement d'écoulement visqueux de la pâte à modeler thérapeutique, et pour éviter toute contamination, la pâte à modeler thérapeutique doit toujours être stockée dans une boîte fermée, à température ambiante.

Composition du matériau

Huile de silicone (82%), dioxyde de silicium (15%), acide borique (<2%), pigments de couleur (1%).

Instructions de nettoyage:

La pâte à modeler thérapeutique ne peut pas être nettoyée. Veuillez vous laver et vous désinfecter soigneusement les mains avant de l'utiliser.

Garantie

Les dispositions légales du pays dans lequel vous avez acheté le produit s'appliquent au produit acheté. Veuillez contacter votre revendeur si vous soupçonnez une demande de garantie. Veuillez nettoyer le produit avant de soumettre une demande de garantie. Si le mode d'emploi ci-joint n'a pas été suffisamment respecté, la garantie peut être altérée ou annulée. Une garantie est exclue en cas d'utilisation non conforme à l'indication, de non-respect des risques d'application et des instructions ainsi que de modifications non autorisées du produit.

Durée d'utilisation / durée de vie du produit

La durée de vie utile de la TheraPIE Knete est déterminée par l'usure naturelle sous réserve d'une manipulation correcte et manipulation orientée vers l'application. Après l'achèvement du traitement, de la thérapie ou de l'entraînement adapté individuellement éliminez la pâte thérapeutique de manière appropriée.

Obligation de signalement

Si une détérioration grave de l'état de santé survient pendant l'utilisation du dispositif médical, signalez-le à votre revendeur spécialisé ou à nous, le fabricant. et au BfArM (Institut fédéral des médicaments et des dispositifs médicaux). Si vous résidez en Suisse, veuillez contacter notre représentant suisse autorisé. à l'adresse suivante : info@fg-health.ch ou directement à Swissmedic en cas de réclamation.

Elimination:

En fin d'utilisation, le produit doit être éliminé conformément aux réglementations locales.

Déclaration de conformité

Nous confirmons que ce produit est conforme aux exigences du RÈGLEMENT (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil.