

Bedienungsanleitung

MoVeS Para Pro Paraffinbad



1. Zur Paraffinbehandlung

Das MoVeS Para Pro Paraffinbad ist die beste Form der Wärmetherapie bei Patienten mit Arthritis oder anderen rheumatischen Erkrankungen. Die Wärme ist durchblutungsfördernd und muskelentspannend, was sich bei Arthritis, Osteoarthritis und Fibromyalgie schmerzlindernd auswirken kann. Paraffinwachs kann bei Hautverhärtungen durch Sklerodermie sogar für weichere Haut sorgen. Es erhöht die Hautelastizität und sorgt somit für mehr Beweglichkeit bzw. Mobilität, besonders auf der Haut der Hände. Doch der Nutzen von Paraffinwachs geht noch weiter. Da Behandlungen mit Paraffinwachs eine Art Hitzetherapie darstellen, werden sie oftmals bei Muskel-, Sehnen- und Bänderleiden eingesetzt. Ebenso wie im Fall von Erkrankungen wie beispielsweise Arthritis fördern sie die Durchblutung, mildern Gelenksteile und Schmerzen. Sie kommen auch bei der Behandlung von Bursitis, Sehnenscheidenentzündung, Verstauchungen und Muskelzerrungen zum Einsatz.

Das MoVeS Para Pro Paraffinbad kann zudem für ästhetischen Behandlungen eingesetzt werden, was in den vergangenen Jahren in Europa, Amerika und Südostasien zunehmend an Beliebtheit gewann. Seine Verwendung ist nicht nur auf das Gesicht beschränkt, es kann auch einer Behandlung des gesamten Körpers dienen. Die Paraffinbehandlung ist die perfekte Methode, um trockene und raue Haut wieder weich und geschmeidig werden zu lassen, weshalb sie durch die erstaunlichen Ergebnisse ihren Spitznamen „Kristallmaske“ erhalten hat. Die beim Schmelzen freiwerdenden Vitamine und Nährstoffe sind wohltuend für die Haut.

Kommt das geschmolzene Paraffin mit der Haut in Berührung, wird es sofort fest und bildet eine isolierende Schicht. Dies unterstützt die Zirkulation des Blutkreislaufes, verbessert die Aufnahme von Nährstoffen, dient der Faltenglättung und fördert die Hautfeuchtigkeit, was die Haut wieder strahlend erscheinen lässt. Paraffinbehandlung kann ganz einfach für Hände, Hals, Brust, Beine und Füße angewendet werden.

2. Vorbereitung

Diese Paraffinwanne ist mit einem elektronischen Thermostat mit einem Temperaturbereich von 40°C bis 60°C ausgestattet. Das Gerät in eine geerdete Steckdose mit der richtigen Spannung stecken (220V, 50/60Hz). Sicherstellen, dass es auf einer ebenen Fläche und nicht an einem sonnigen Fenster, an einem Heizkörper oder einer anderen Wärmequelle steht.

Das Paraffin in die Wanne legen. Zur Beschleunigung des Schmelzprozesses das Thermostat für eine Stunde auf „10“ und dann auf 56°C senken oder weniger. Fügen Sie niemals ein Teil des Körpers ein, wenn die Temperatur über 56°C ist! Das Gerät ist für einen täglichen 24-Stunden-Betrieb vorgesehen. Die Kontrollleuchte schaltet sich während des normalen Betriebes an und aus. Den Deckel immer auf dem Gerät lassen, wenn es nicht verwendet wird.



Bedienungsanleitung

MoVeS Para Pro Paraffinbad



1. Zur Paraffinbehandlung

Das MoVeS Para Pro Paraffinbad ist die beste Form der Wärmerotherapie bei Patienten mit Arthritis oder anderen rheumatischen Erkrankungen. Die Wärme ist durchblutungsfördernd und muskelentspannend, was sich bei Arthritis, Osteoarthritis und Fibromyalgie schmerzlindernd auswirken kann. Paraffinwachs kann bei Hautverhärtungen durch Sklerodermie sogar für weichere Haut sorgen. Es erhöht die Hautelastizität und sorgt somit für mehr Beweglichkeit bzw. Mobilität, besonders auf der Haut der Hände. Doch der Nutzen von Paraffinwachs geht noch weiter. Da Behandlungen mit Paraffinwachs eine Art Hitzetherapie darstellen, werden sie oftmals bei Muskel-, Sehnen- und Bänderleiden eingesetzt. Ebenso wie im Fall von Erkrankungen wie beispielsweise Arthritis fördern sie die Durchblutung, mildern Gelenkteile und Schmerzen. Sie kommen auch bei der Behandlung von Bursitis, Sehnenscheidenentzündung, Verstauchungen und Muskelzerrungen zum Einsatz.

Das MoVeS Para Pro Paraffinbad kann zudem für ästhetischen Behandlungen eingesetzt werden, was in den vergangenen Jahren in Europa, Amerika und Südostasien zunehmend an Beliebtheit gewann. Seine Verwendung ist nicht nur auf das Gesicht beschränkt, es kann auch einer Behandlung des gesamten Körpers dienen. Die Paraffinbehandlung ist die perfekte Methode, um trockene und raue Haut wieder weich und geschmeidig werden zu lassen, weshalb sie durch die erstaunlichen Ergebnisse ihren Spitznamen „Kristallmaske“ erhalten hat. Die beim Schmelzen freiwerdenden Vitamine und Nährstoffe sind wohltuend für die Haut.

Kommt das geschmolzene Paraffin mit der Haut in Berührung, wird es sofort fest und bildet eine isolierende Schicht. Dies unterstützt die Zirkulation des Blutkreislaufes, verbessert die Aufnahme von Nährstoffen, dient der Faltenglättung und fördert die Hautfeuchtigkeit, was die Haut wieder strahlend erscheinen lässt. Paraffinbehandlung kann ganz einfach für Hände, Hals, Brust, Beine und Füße angewendet werden.

2. Vorbereitung

Diese Paraffinwanne ist mit einem elektronischen Thermostat mit einem Temperaturbereich von 40°C bis 60°C ausgestattet. Das Gerät in eine geerdete Steckdose mit der richtigen Spannung stecken (220V, 50/60Hz). Sicherstellen, dass es auf einer ebenen Fläche und nicht an einem sonnigen Fenster, an einem Heizkörper oder einer anderen Wärmequelle steht.

Das Paraffin in die Wanne legen. Zur Beschleunigung des Schmelzprozesses das Thermostat für eine Stunde auf „10“ und dann auf 56°C senken oder weniger. **Fügen Sie niemals ein Teil des Körpers ein, wenn die Temperatur über 56°C ist!** Das Gerät ist für einen täglichen 24-Stunden-Betrieb vorgesehen. Die Kontrollleuchte schaltet sich während des normalen Betriebes an und aus. Den Deckel immer auf dem Gerät lassen, wenn es nicht verwendet wird.





3. Behandlung

HAND

1. Schmuck ablegen. Die Haut gründlich reinigen.
2. Ein Papiertaschentuch zum vollständigen Trocknen der Hände verwenden.
3. Eine Kollagen-Emulsion auf die Hände auftragen und vollständig einreiben.
4. Vor dem Eintauchen die Temperatur überprüfen. Die Hand leicht ins geschmolzene Wachs tauchen und herausziehen. Den Vorgang etwa fünfmal wiederholen, bis sich eine 5-10mm dicke Schicht gebildet hat.
5. Den Plastikhandschuh anziehen.
6. Einen Wärmehandschuh über die Hand ziehen, um die Wärme zu halten.
7. Das Wachs für 10 Minuten aufgetragen lassen und entspannen.
8. Wie einen Handschuh abziehen und entsorgen.
9. Nach Entfernung des Wachses sofort einen Feuchtigkeitscreme auftragen, da die Poren geöffnet sind und sie die Feuchtigkeit leichter aufnehmen können.

GESICHT

1. Den Pinsel zum Aufweichen für 5 Minuten in die Wanne legen.
2. Das Gesicht reinigen, trockenreiben, dann die Kollagen-Emulsion auf das Gesicht auftragen und vollständig einreiben.
3. Die Temperatur überprüfen und die Augen mit Baumwolltuch bedecken.
4. Mit dem Pinsel das Wachs im Gesicht auftragen.
5. Den Mull auf das Gesicht legen.
6. Für ein optimales Ergebnis das Wachs drei- bis viermal auf den Mull auftragen.
7. Das Wachs 15 Minuten aufgetragen lassen und entspannen.
8. Den Mull vom Gesicht abziehen und entsorgen.
9. Nach Entfernung des Wachses sofort einen Feuchtigkeitscreme auftragen, da die Poren geöffnet sind und sie die Feuchtigkeit leichter aufnehmen können.

FÜSSE

1. Den Fuß reinigen, die Haut gründlich säubern, trockenreiben, dann eine Kollagen-Emulsion auf den Fuß auftragen und vollständig einreiben.
2. Vor dem Eintauchen die Temperatur überprüfen. Den Fuß vorsichtig ins geschmolzene Wachs tauchen und herausziehen. Den Vorgang etwa fünfmal wiederholen, bis sich eine 5-10mm dicke Schicht gebildet hat.
3. Den Plastikstrumpf über den Fuß ziehen.
4. Einen Wärmestrumpf über die Hand ziehen, um die Wärme zu halten.
5. Das Wachs 10 Minuten aufgetragen lassen und entspannen.
6. Wie einen Strumpf abziehen und entsorgen.
7. Nach Entfernung des Wachses sofort einen Feuchtigkeitscreme auftragen, da die Poren geöffnet sind und sie die Feuchtigkeit leichter aufnehmen können.

Bitte Beachten!

Aus hygienischen Gründen unterschiedliche Paraffinbäder zur Behandlung von Händen, Füßen und Körper verwenden.
Das Wachs nicht wiederverwenden.





4. Gegenanzeigen

KEINE PARAFFINBEHANDLUNG DURCHFÜHREN BEI:

- Offenen Wunden
- Hautreizungen
- Hautirritationen
- Eingeschränktem Wärmeempfinden.

5. Pflege

Vor jeder Verwendung überprüfen, ob der Paraffinpiegel sich zwischen der Mindest- und der Höchstanzeige befindet. Ist der Spiegel zu niedrig, sollte er bis zum richtigen Stand aufgefüllt werden. Das Gerät ohne Paraffin in der Wanne nicht einschalten.

Keine anderen Produkte zum Paraffin (Wanne) hinzufügen, da hierdurch der Schmelzpunkt verändert und das Betriebssteuerungssystem beeinflusst werden kann.

6. Reinigung

- Nach 50 Behandlungen können sich Schmutz und andere unerwünschte Fremdkörper am Boden des Wachsbehälters ansammeln. In diesem Fall sollte das Wachs entfernt werden.
- Das Gerät ausschalten, warten bis das Paraffin abgekühlt, getrocknet und gehärtet ist.
- Zur Entfernung des festen Paraffinblocks vom Gerät, dieses für einige Minuten auf 10 stellen, bis die Paraffinränder zu schmelzen beginnen und die Seiten sich lösen. Auf ein Ende des Blocks drücken, um ihn aufzurichten. Den Block aus der Wanne nehmen.
- Das Gerät ausschalten und ein Papiertuch zur Reinigung der Wanne verwenden. Wachsreiniger zur gründlichen Entfernung der verschmutzten Wachsschichten verwenden.
- Neues Paraffin einfüllen und mit der Verwendung beginnen.

7. Warnung

- Die Paraffinwanne nicht mit Wasser füllen oder mit Wasser tränken. Dies kann zu irreparablen Schäden führen.
- Bei Funktionsstörungen an einem Gerät keine eigenständigen Reparaturversuche vornehmen, sondern den Vertrieb
- spartner für Kontrolle und Reparatur kontaktieren.
- Sicherstellen, dass sich das Gerät auf einer trockenen und stabilen Oberfläche befindet.
- Die Paraffinwanne stets in gut gelüfteten Bereichen verwenden.
- Den Deckel immer auf dem Behälter lassen, wenn dieser nicht verwendet wird.

8. Zubehör

In der Anleitung erwähntes Zubehör wie Reinigungsflüssigkeit, Paraffin, Folienhandschuh, Folienstrumpf, Handtuch, Pinsel, Mull, Kollagen-Emulsion etc. muss separat erworben werden.





9. Technische Daten



Maße	9 cm x 25 cm x 18 cm (L x B x H)
Nettogewicht	3,1 kg
Netzspannung	220 V - 50 Hz / 60 Hz
Leistung	150 W
Betriebstemperatur	40°C – 60°C
Temperaturgenauigkeit	Temperatureinstellung $\pm 1,5^{\circ}\text{C}$
Paraffinmenge	2 bis 3 kg (Mindest- – Höchstanzeige)
Betriebszeit	24/7



Hersteller: MVS In Motion
Westdijk 150 / 2830 Tisselt (Willebroek)
Belgium - Europe

