

Gebrauchsanweisung

# AFH Fingerendgelenk- schiene | Bandage nach Stack



## Indikationen

Die AFH Fingerendgelenkschiene nach Stack dient der Ruhigstellung des Endgelenks in leichter Hyperextension. Diese Orthese ist konzipiert zur konservativen Behandlung von Frakturen und Strecksehnenrissen am Finger-Endgelenk. Die Ruhigstellung des DIP-Gelenks kann nach Verletzungen oder Operationen erforderlich sein wie beispielsweise bei gerissenem Umfang zu finden und wird mit dem Klettverschluss am Finger fixiert. Die Schiene kann auch entsprechend ausgepolstert werden. Die Adaption sollte stets durch geschultes Fachpersonal / Arzt erfolgen.

## Größen

Messen Sie den Umfang des distalen Interphalangeal-Gelenks am betroffenen Finger und wählen Sie die richtige Größe anhand der nachstehenden Größentabelle.



Größe	Artikelnummer	Umfang DIP-Gelenk
1 = XS	1841701-01	ca. <= 5,0 cm
2 = S	1841701-02	ca. 5,0 cm – 5,5 cm
3 = M/S	1841701-03	ca. 5,5 cm - 5,8 cm
4 = M	1841701-04	ca. 5,8 cm – 6,1 cm
5 = L/M	1841701-05	ca. 6,1 cm – 6,3 cm
5,5 = L	1841701-06	ca. 6,3 cm – 6,8 cm
6 = XL	1841701-07	ca. 6,8 cm – 7,3 cm
7 = XXL	1841701-08	ca. 7,3 cm – 8,4 cm

## Anwendung:

1. Legen Sie das mitgelieferte Klettband bereit.
2. Schieben Sie die Schiene auf den betroffenen Finger. Der Finger muss beim Anlegen gerade bleiben. Achten Sie darauf, dass der Finger gut in der Schiene sitzt. Wenn die Schiene zu locker sitzt, kann sie den Finger nicht fixieren. Wenn die Schiene zu fest sitzt, kann sie Haut und Nerven schädigen.
3. Fixieren Sie den Finger in der Schiene, indem Sie das vorbereitete Klettband um das Ende der Schiene wickeln, das dem Fingerknöchel am nächsten liegt.

Alternativ können Sie zur Befestigung auch einen Pflasterstreifen verwenden.



## Reinigungshinweise:

1. Sorgen Sie für eine angemessene Hauthygiene. Reinigen Sie den betroffenen Finger täglich.
2. Trocknen Sie den Finger gründlich ab, bevor Sie die Schiene wieder anlegen.

## Warnung:

Sollten nach dem Anlegen dieser Schiene Schmerzen, Schwellungen, Pochen oder Gefühlsstörungen an den Fingern auftreten, suchen Sie bitte Ihren Arzt auf.



Nutzen Sie die Schiene  
nur für einen Patienten.



Das Produkt ist latexfrei.



AFH Webshop® · Inhaber Rainer Zumhasch  
Pyrmonter Straße 50 · 32676 Lügde · Germany  
[www.premium-therapie.de](http://www.premium-therapie.de)



Xiamen J-Brace Medical Equipment Co., Ltd  
2F, 179# Tong'an Park Tong'an Industrial  
Concentration Area, Xiamen 361100 P.R.C



Riomavis S.L., Calle de Almansa 55, 1D,  
Madrid 28039 Spain

