

Bedienungsanleitung

# Anti Schwanenhals Ringe (Murphy Ring)



**Wir bedanken uns bei Ihnen, dass Sie sich für unseren Murphy Ring entschieden haben. Damit Sie viel Erfolg mit Ihrem Murphy Ring haben, beachten Sie bitte folgende Hinweise.**

## Anwendungsgebiete:

Die „Murphy Ringe“ dienen in erster Linie zur Korrektur des PIP-Gelenks im Sinne einer Schwanenhalsdeformität (z.B. rheumatoiden Arthritis).

Sie verhindern abnorme Überdehnungen des Bandapparates und können einer weiteren Instabilität (insbesondere der lateralen Ligamente) vorbeugen, wobei die aktive Flexion (Beugung) der Gelenke nicht behindert wird. Somit hilft der „Murphy-Ring“, die Funktion der Fingerbeweglichkeit zu erhalten und macht eine alltagsnotwendige Funktion der Hand möglich.



## Anwendungshinweise:

Die Größe des jeweiligen Ringes wird nach dem Fingerumfang des jeweiligen Fingers ausgewählt. Hierbei wird jeweils der Umfang (siehe Größentabelle) vor dem betreffenden- und hinter dem betreffenden Gelenk mittels einer Ringschablone bzw. eines Fingerumfangmessgeräts gemessen.

Die Anwendung sollte stets unter Absprache eines Arztes bzw. Therapeuten erfolgen. Wichtig ist die regelmäßige Reinigung des Murphy-Rings. Bei Schmerzen, Rötungen, Schwellungen und sonstigen Problemen sollte der Ring abgesetzt werden. Fragen Sie im Zweifelsfall stets Ihren Arzt und Therapeuten um Rat.






## Eigenschaften:

Das Material besteht aus hochwertigem Edelstahl mit polierter Oberfläche. Die Dicke der Ringschiene beträgt ca. 2mm. Die Murphy-Ringe werden in 12 verschiedenen Größen von Ø 13 mm bis Ø 24 mm angeboten.

Das Produkt entspricht der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte der Klasse 1.

## Größentabelle:

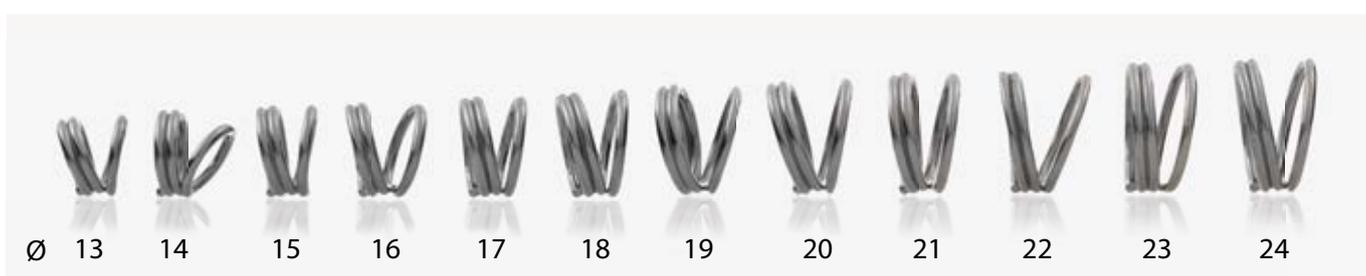

| Größe   | Umfang    | Best.Nr.  |
|---------|-----------|-----------|
| Ø 13 mm | ca. 41 mm | 011529-01 |
| Ø 14 mm | ca. 44 mm | 011529-02 |
| Ø 15 mm | ca. 47 mm | 011529-03 |
| Ø 16 mm | ca. 50 mm | 011529-04 |
| Ø 17 mm | ca. 53 mm | 011529-05 |
| Ø 18 mm | ca. 57 mm | 011529-06 |
| Ø 19 mm | ca. 60 mm | 011529-07 |
| Ø 20 mm | ca. 63 mm | 011529-08 |
| Ø 21 mm | ca. 66 mm | 011529-09 |
| Ø 22 mm | ca. 69 mm | 011529-10 |
| Ø 23 mm | ca. 72 mm | 011529-11 |
| Ø 24 mm | ca. 75 mm | 011529-12 |

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Ihr AFH-Webshop Team

