

Gebrauchsanweisung – Dexterous-Ringe

Catell empfiehlt, dass das Produkt von einem lizenzierten oder anderweitig qualifizierten Arzt angepasst wird. Benutzer mit Diabetes, empfindlicher Haut, bekannten Kontaktallergien, eingeschränkter Sensibilität oder schlechter Durchblutung müssen bei der Verwendung der Bandage besonders aufmerksam sein und auf Quetschungen Reibung oder Ödeme beim Tragen der Orthese achten. Überprüfen Sie immer den Inhalt des Materials unten.

Alle schwerwiegenden Vorfälle, die dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, in dem der Anwender und/oder des Mitgliedstaates gemeldet werden, in dem der Anwender und/oder Patient ansässig ist. Wenden Sie sich an Ihren Arzt oder an Catell wenn Sie Fragen zu diesem Produkt haben.


Anwendungsbereich

Fingerring in kurzer und langer Ausführung zur Korrektur von Kontrakturen der PIP-Gelenke. Der Winkel der Orthese kann mit einer Heißluftpistole eingestellt werden.

Ausführung kurz



Ausführung lang

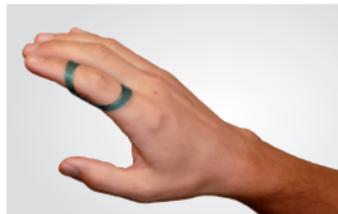

Eigenschaften:

Latexfrei und nickelfrei
Blau oder Transparent
12 und 15 verschiedene Größen

Material:

Polycarbonat, Latexfrei

Sicherheitshinweise: Es ist wichtig sicherzustellen, dass der Ring richtig passt und keinen Druck oder Schmerzen verursacht. Bei anhaltenden Beschwerden oder Unwohlsein sollte ein Fachmann konsultiert werden. Patienten mit Diabetes, empfindlicher Haut, bekannten Kontaktallergien, eingeschränkter Sensibilität oder schlechter Durchblutung müssen bei der Verwendung der Ringe besonders aufmerksam sein und auf Quetschungen, Scheuerstellen oder Ödeme achten, wenn sie die Ringe benutzen.

Gebrauchsanweisung – Dexterous-Ringe

Größenbestimmungsset für Dexterous Rings

Mit diesem Set können Sie problemlos die passende Größe ermitteln. Das Set enthält 2 Ringe. Auf dem einen Ring sind die Größen 1 - 12 der langen Variante und auf dem anderen Ring die Größen 19 - 33 der kurzen Variante.



Größen: Übersicht der erhältlichen Größen der langen und kurzen Ausführungen.

Ausführung lang

Größe	Umfang
1	ca. 39 - 41 mm
2	ca. 42 - 44 mm
3	ca. 45 - 47 mm
4	ca. 48 - 50 mm
5	ca. 51 - 53 mm
6	ca. 54 - 56 mm
7	ca. 57 - 59 mm
8	ca. 60 - 62 mm
9	ca. 63 - 65 mm
10	ca. 66 - 68 mm
11	ca. 69 - 71 mm
12	ca. 72 - 74 mm

Ausführung kurz

Größe	Umfang
19	ca. 33 - 35 mm
20	ca. 36 - 38 mm
21	ca. 39 - 41 mm
22	ca. 42 - 44 mm
23	ca. 45 - 47 mm
24	ca. 48 - 50 mm
25	ca. 51 - 53 mm
26	ca. 54 - 56 mm
27	ca. 57 - 59 mm
28	ca. 60 - 62 mm
29	ca. 63 - 65 mm
30	ca. 66 - 68 mm
31	ca. 69 - 71 mm
32	ca. 72 - 74 mm
33	ca. 75 - 77 mm

Reinigungshinweise: Die Catell Dexterous Ringe können mit mildem Seifenwasser gereinigt und trocken abgewischt werden. Vermeiden Sie den Einsatz von scharfen Chemikalien oder heißen Temperaturen, um die Schienen nicht zu beschädigen.

Entsorgung: Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften.

Hinweise: Das Produkt entspricht der Medical Device Regulation (MDR) – VERORDNUNG (EU) 2017/745, ist somit ein Medizinprodukt der Klasse 1 und für den medizinischen Gebrauch geeignet. Einzelner Patient - mehrfach anwendbar.