

Produktinformationsblatt


AFH Kinesiologie Tape Exclusiv Serie



Allgemeine Anwendungshinweise und Produktinformationen

Durch verschiedene Materialien, Formen, Größen und Farben ermöglicht die AFH Kinesiologie Tape Exclusiv Serie eine optimale Anwendungsvielfalt.

AFH Aktiv-Tape Exclusive

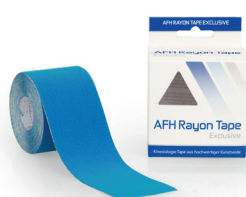

AFH Rayon-Tape Exclusive

AFH L-Tape Exclusive




AFH Cross-Tape Exclusive

Produkt- und Materialeigenschaften

Der Grundstoff des klassischen Tapes (AFH Aktive Tape) ist Baumwolle, die mit Elastanfäden durchzogen ist. Dieser Materialmix verleiht ihm seine längs- und querelastischen Eigenschaften. Die Dicke, Schwere und Konsistenz des Materials sind der Beschaffenheit der menschlichen Haut nachempfunden. Dadurch verfügen die AFH Tapes über eine sehr gute Dehnbarkeit (bis zu 80 %) und erfüllen trotzdem ihre Stützfunktion.

Bei dem AFH L-Tape sorgt die Lochung im Tape dafür, dass die Haut sowie die Faszien stärker angehoben werden. So kann die Haut besser atmen und das Tape kann optimal angepasst werden.

Das AFH Rayon Tape besteht aus hochwertiger Kunstseide (dies erhöht den Tragekomfort und die Wasserbeständigkeit) und ist trotzdem elastisch und luftdurchlässig.

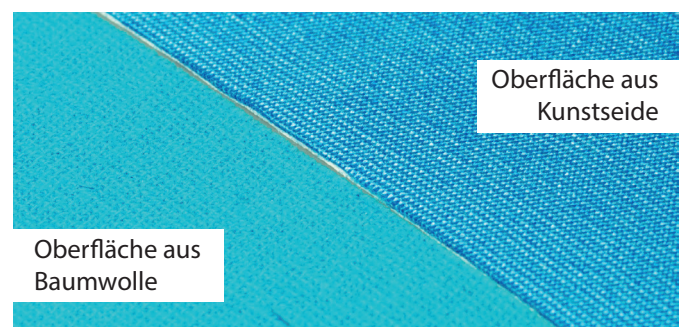



Weitere Materialeigenschaften

An der Innenseite ist ein thermoaktiver Acrylatkleber in unterbrochenen Wellenlinien aufgebracht. In der Gesamtbetrachtung ergeben die Wellen ein Bild, dass an die Linien des Fingerabdrucks erinnert. Der Kleber ist komplett frei von Wirkstoffen und Latex und wird durch die Körperwärme aktiviert.

Durch die wasserbeständige Acrylatbeschichtung können die Tapes selbstklebend an fast jedes Körperteil gut angebracht werden.

Der Kleber ist sehr wasserresistent und widersteht auch verstärkter Feuchtigkeitseinwirkung, wie sie beim Duschen, Baden oder erhöhter Schweißbildung entstehen. Die durchschnittliche Haltedauer auf der Haut beträgt drei bis sieben Tage.

Insgesamt ist der Tapeverband sehr hautfreundlich, luft- und feuchtigkeitsthroughlässig. Die Hautatmung und der Feuchtigkeitstransport der Haut wird kaum behindert und bleibt im Gleichgewicht.


Die besonderen Materialeigenschaften machen sich auch beim Ablösen bemerkbar. Im Gegensatz zur Entfernung von klassischen Tapeverbänden ist es schonend und relativ schmerzfrei möglich. Der Zeitaufwand ist sehr gering, auch weil keine zusätzlichen Hilfsmittel wie eine Schere notwendig sind. Der Kleber löst sich vollständig von der Haut und hinterlässt keine Reste.

⚠ Beachte!

Die Adaption der Tapes sollte ausschließlich von geschulten Therapeuten oder Ärzten durchgeführt werden. Bei Juckreiz, Hautrötungen oder einer allergischen Reaktion ist das Tape umgehend zu entfernen. Verwenden Sie das Tape niemals bei offenen Wunden oder als Verbandsmaterial.

Für Fehler und Irrtümer sowie daraus entstehende Schäden wird keinerlei Haftung übernommen.

Produkt Features

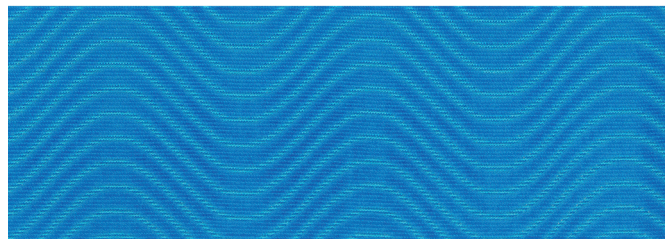

Wellenförmig aufgetragener Acrylat-Kleber für verbesserte Klebeeigenschaften



Rastereinteilung von 1 cm x 1 cm für einen leichteren Zuschnitt



Farbenvielfalt für jeden Geschmack...

Hinweis

Für eine optimale Haftung auf der Haut, sollte die Haut sauber, trocken und fettfrei sein. Sind die Tapes korrekt angelegt bzw. geklebt, werden Sie keine Einschränkungen in ihren täglichen Aktivitäten merken.

