

Gebrauchsanweisung

Sport Tape Medical



Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung gründlich durch, bevor Sie das Produkt nutzen.

- Produktname: Sport Tape Medical
- Produktmodell: Breite: 2,0 cm – 5 cm, Länge 9,1 m
- Verwendungszweck: Es wird hauptsächlich in der Sporttherapie zur Unterstützung von Gelenken und Muskeln eingesetzt.
- Produktbeschreibung/Zusammensetzung: Das Produkt besteht hauptsächlich aus einem Baumwollstoff und einem Klebstoff.
- Kontraindikation: Dieses Produkt enthält Klebstoff und sollte mit Vorsicht bei Patienten mit einer Vorgeschichte von Allergien verwendet werden.

Achtung!

1. Verwenden Sie das Tape nicht auf gereizter, infizierter oder geröteter Haut, auf Wunden oder infizierten Wunden.
2. Nicht bei Gelenkinstabilität verwenden.
3. Testen Sie bei bekannten Allergien ein Stück des Tapes vor der Verwendung, indem Sie ein kleines Stück davon für einige Stunden auf der Haut platzieren.
4. Bei Reizungen und Rötungen darf das Tape nicht mehr verwendet werden.
5. Wenden Sie sich im Zweifelsfall zuerst an Ihren Arzt oder Therapeuten.
6. Außerhalb der Reichweite und Sichtweite von Kindern aufbewahren.
7. Von Sonnenlicht und Wärmequellen fernhalten.
8. Verwenden Sie ein bereits angebrachtes Tape nach dem Abnehmen von der Haut nicht erneut.
9. Wenn Sie schwanger sind, konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie das Tape verwenden.
10. Nicht mit zu viel Spannung und nicht kreisförmig anbringen, um einen Tourniquet-Effekt (Abbinden des Blutflusses) zu vermeiden.
11. Halten Sie sich strikt an die Gebrauchsanweisung.
12. Verwenden Sie das Produkt nicht nach Ablauf des Verfallsdatums oder wenn es verunreinigt ist.
13. Dieses Produkt ist ein Einwegprodukt, bitte nicht wiederverwenden.





Warnung:

Das Produkt kann bei Kindern und Erwachsenen, Säuglingen und schwangeren Frauen genutzt werden und sollte unter der Anleitung eines Arztes verwendet werden.

Methode:

1. Verwenden Sie Wasser oder Alkohol, um die Haut vor dem Anbringen des Tapes zu reinigen.
2. Wählen Sie das entsprechende Tape für die am Körper vorgesehene Stelle.
3. Anwendung durch medizinisches Personal entsprechend den Symptomen des Patienten.

Lagerung und Transport:



Das Produkt sollte im Allgemeinen an einem sauberen, kühlen, trockenen und belüfteten Platz gelagert werden.

Temperatur: 5 °C ~ 35 °C, Luftfeuchtigkeit: 35% ~ 75%). Es sollte nicht mit giftigen, schädlichen und riechenden Gegenständen vermischt werden.

Größen:



ca. 2,0 cm x 9,1 m



ca. 3,8 cm x 9,1 m



ca. 5 cm x 9,1 m





Hersteller:



Firmenname: Nanjing Hopesun Technology Co.,Ltd.

Adresse: No.29 Longji Road, Luhe District, NanJing, JiangSu Province, P.R.China

Telefon: +8617388079176

E-Mail: info@hope-medi.com

Repräsentative der Europäischen Union:



Firmenname: SUNGO Europe B.V.

Adresse: Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA Capelle aan den, Niederlande.

Tel: +31(0)10 3034500, +31(0)2021 11106

E-Mail: ec.rep@sungoglobal.com

Kennzeichnungen:

	Chargen Code		Bitte nicht wiederverwenden
	Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor Gebrauch sorgfältig durch		Medizinprodukt
	Warnung und Achtung, bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung für den Einsatz.		Hersteller
	Bevollmächtigter Vertreter in der Europäischen Union		Trocken lagern
	Nicht steriles Produkt		Nutzen Sie das Produkt nicht, wenn die Verpackung beschädigt ist
	Herstellungsdatum		Haltbarkeitsdatum
	Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der Europäischen Verordnung (EU) 2017/745.		Importeur

Importiert durch:



AFH Webshop®

Inhaber Rainer Zumhasch

Pyrmonter Straße 50 · 32676 Lügde · Germany

Tel.: 0049 5281/98712-63

Fax: 0049 5281/98712-64

info@premium-therapie.de

www.premium-therapie.de

