

Anleitung

# Schröpfmassage mit Schröpfgläsern



## Schröpfmassagen dienen der Entspannung für Wellness und Wohlbefinden.

### Die Schröpfmassage

Ein Schröpfglas wird auf die Haut gesetzt und anschließend wird ein leichter Unterdruck mittels der Saugpumpe / Vakuumpumpe im Glas erzeugt (Abbildung 1), sodass sich das Glas, bzw. auch Gläser, mittels einer Hand leicht über die Haut gleiten lassen (Abbildung 2). Die Pumpe vor der Massage aus dem Ventil der Massageschröpfgläser entfernen.

Mittels Verwendung von einem Massageöl, bzw. Massagecreme, lässt sich dieser Effekt verstärken. Jede Schröpfglassmassage sollte kurz und absolut schmerzfrei mit einem wohltuenden Gefühl durchgeführt werden.

Je nach Hautareal für die jeweilige Massage bietet das Massageschröpfset unterschiedliche Größen im Durchmesser (Abbildung 3).

Für die beigegefügte Massagepunkteinsätze werden die Massageschröpfgläser hiermit punktuell und für einen kurzen Moment auf die Haut gesetzt (ebenfalls mit einem minimalen Unterdruck im Massageschröpfglas bei einem wohltuenden Massagegefühl).



Abbildung 1



Abbildung 2





Schröpfset | Schröpfköpfe 24 teilig mit Vakuumpumpe



Abbildung 3



Reinigung:

Die Reinigung der Massageschröpfgläser wird beispielsweise mit hochprozentigem Alkohol oder desinfizierende Reinigungstücher durchgeführt. Es dürfen für die Massage keine beschädigten Schröpfköpfe verwendet werden. Der hochwertige kratz sichere Kunststoff garantiert die Langlebigkeit der Massageschröpfgläser.

**HAFTUNGSAUSSCHLUSS:**

**Bei unsachgemäßer Handhabung des Produktes wird keinerlei Haftung übernommen.**

Schröpfset | Schröpfköpfe 12 teilig mit Vakuumpumpe



Schröpfset 24 teilig im Kunstleder-Koffer mit Saugpumpe



Schröpfset | Schröpfköpfe 6 teilig mit Vakuumpumpe

