



Bedienungsanleitung

AFH Entlastungspad



Spezial-Gelkissen zur Entlastung der Gelenke, Senkung des Muskeltonus und zur Druckverteilung.

Legen Sie das Pad plan auf die Behandlungsfläche. Hat die Behandlungsfläche eine glatte Oberfläche, legen Sie zur Rutschhemmung die mitgelieferte spezielle Antirutsch-Unterlage zwischen Fläche und dem Entlastungspad. Die Behandlungsfläche des Pads kann von beiden Seiten benutzt werden, einfach das Pad entsprechend drehen/wenden. Dies ermöglicht einen wesentlich effektiveren Einsatz des Produktes.

Damit das Entlastungspad gleichmäßig belastet wird und lange die optimale Funktion erhalten bleibt, muss es nach jeder Behandlung gedreht und/oder gewendet werden, wie man es auch mit Kopfkissen oder Matratzen durchführt.

Das Entlastungspad und sein Gel sind kälte- und hitzebeständig bis zu -40° und bewahren sämtliche physikalischen Eigenschaften, selbst bei hohen Temperaturen von bis zu 80°C. Das Pad sollte flach und bei mäßiger Temperatur gelagert werden.

Pflegehinweise:

Das Entlastungspad ist mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln im Verhältnis 1:10 (z. B. Inzidin oder ähnlich) zur Wischdesinfektion zu behandeln. Bitte mit kaltem oder handwarmen, nicht mit kochendem Wasser reinigen.



Das in Folie eingeschweißte Gelkissen ist nicht maschinenwaschbar, nicht schleuder- und trocknergeeignet.



Der abnehmbare Baumwoll-Bezug des Pads besteht aus 100% Baumwolle und kann mit einem Colorwaschmittel bei 30°C gewaschen werden.

Eigenschaften:

- Maße: 45 cm x 42 cm
- Dicke Gel-Pad: ca. 1,6 cm (Höhe: +/- 5%)
- Hitzebeständig: von - 40°/+ 80°
- Maximales Belastungsgewicht: ca. 110 kg

